



Ortopedia para Mascotas

www.petwheels.com.ar - info@petwheels.com.ar

Querido Amigo:

La siguiente guía, junto con las instrucciones para armar y colocar la silla de ruedas, lo asistirá para hacer el mejor uso posible para su mascota.

Recomendamos, gradualmente, acondicionar su mascota a la silla antes de períodos prolongados de ejercicio.

Le sugerimos comenzar con 10 minutos de ejercicio, caminando sobre una superficie dura.

Siempre es aconsejable utilizar una correa sujeta al collar.

Repetir dos o tres veces por día durante la primer semana, luego incrementar el tiempo de ejercicio.

Una vez que se halla utilizado la silla durante algún tiempo, juntos, su mascota y Ud. conocerán el tiempo adecuado para pasear y jugar.

Para aquellas mascotas que vuelven a caminar por sus propios medios, recomendamos el uso diario de la silla para realizar el ejercicio adecuado.



- **Totalmente regulable**
- **Hecha en aluminio 100%**
- **Punto de Apoyo Mejorado**
- **Menor Impacto Visual**
- **Más liviana**
- **Antivuelco**
- **Lavable**

**Nuevo
Modelo!!**

**NUNCA DEJE A SU MASCOTA DESATENDIDA
MIENTRAS PERMANECE EN LA SILLA!!!**

ARMADO DE LA SILLA

Dentro de la caja Ud. encontrará la silla desarmada de la siguiente forma
Con la misma vienen dos llaves Allen para ajustar y regular a la medida adecuada.

**SI SU SILLA INCLUYE UN REFUERZO ADICIONAL DIRIJASE
A LAS INSTRUCCIONES DE LA ULTIMA PAGINA.**



- Si Ud. recibió la silla con las ruedas colocadas, ignore el siguiente paso.-

COLOCACION DE LAS RUEDAS

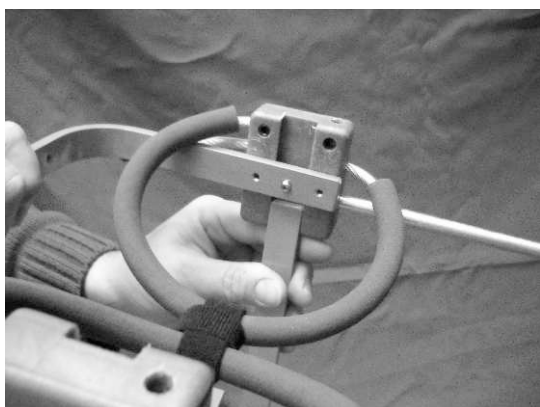


Fig. 1

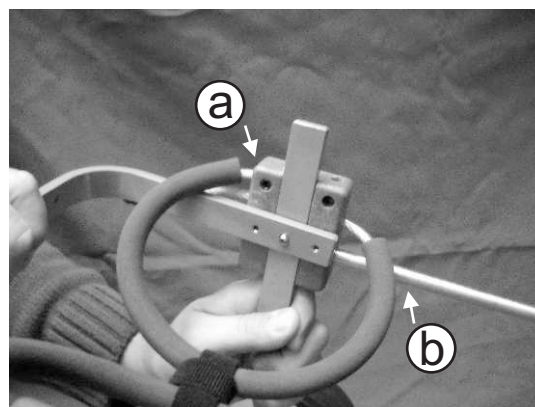


Fig. 2

Coloque el barral con las ruedas a través de la ranura de la pieza plástica de la forma explicada en las **figs. 1 y 2**

(las ruedas deben quedar hacia afuera, ver foto de portada)

Tenga en cuenta que los cables de sujeción (**a**) queden en la parte de arriba y la varilla que corre a lo largo (**b**), quede debajo. El logo **Petwheels** debe leerse normalmente en la *Pieza Plástica Principal*.

ESTAS REGULACIONES SON NECESARIAS POR UNICA VEZ!!!

REGULACION DE LA ALTURA

1. Desabroche el mosquetón con la soga roja que se encuentra en la parte delantera de la silla. **Fig 3**

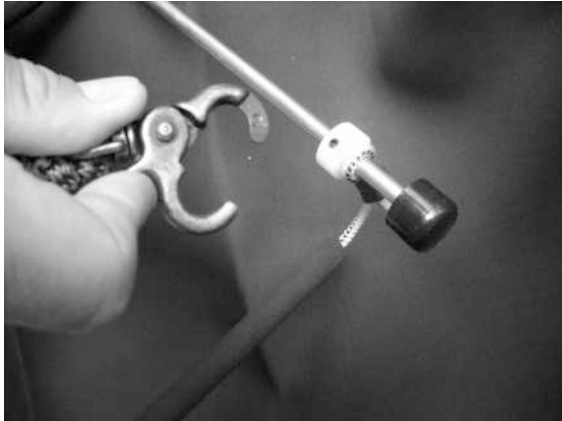


Fig. 3

2. Coloque a su mascota en la silla, introduciendo las patas traseras a través de los *anillos de goma*. **Fig 4**

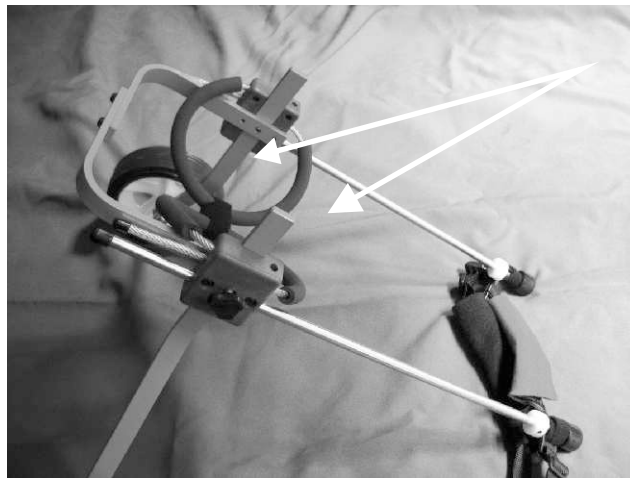


Fig. 4

3. Levante la parte delantera de la silla y abroche el mosqueton con soga roja por arriba del lomo de su mascota. tenga en cuenta la soga blanca que queda debajo, tiene que pasar por detrás de las patas delanteras. *Haga varios nudos a las sogas.*
LA SILLA YA ESTA PREPARADA PARA LA REGULACION FINAL

IMPORTANTE:

LA VARILLA QUE CORRE A LO LARGO DE SU MASCOTA TIENE QUE QUEDAR **PARALELA AL PISO**

Esto se logra regulando la soga roja que pasa por encima del lomo de su mascota.

4. Afloje las *mariposas* que se encuentran en los costados de la *pieza plástica principal*. **Fig. 6**

5. Regule la altura del barral de las ruedas a la altura deseada acorde a su mascota.

6. Mida con un centímetro para que ambos barrales queden a la misma altura. **Fig. 5**

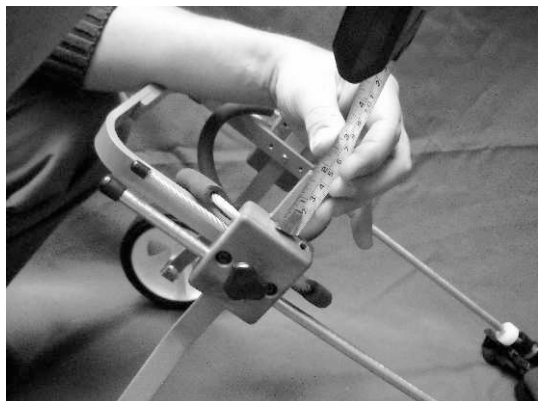


Fig. 5

“Tenga en cuenta que su mascota debe quedar en una posición natural, no es conveniente levantarla exageradamente de la parte trasera para evitar cargar el peso sobre las patitas delanteras.”

7. Ajuste las *mariposas* para fijar **“temporalmente”** la altura. **Fig. 6**

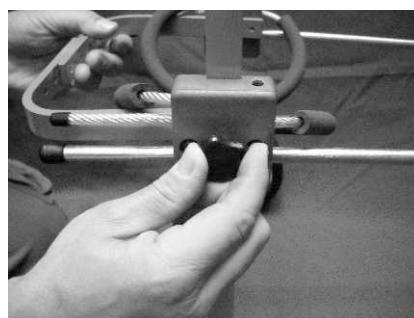


Fig. 6

8. Retire a su mascota de la silla.

9. Afloje las *mariposas*, teniendo en cuenta de no perder la altura seleccionada. *(Si lo desea puede hacer una marca en el barral con un lápiz para que esto no suceda.)*

10. Ajuste los tornillos prisioneros que se encuentran del lado interno. **Fig. 7 Este es el ajuste definitivo de altura.**



Fig. 7

11. Vuelva a ajustar las *mariposas*

REGULACION DEL LARGO

“Seguramente Ud. recibió la silla con esta regulación pre-establecida por nosotros, en base a las medidas que nos fueron enviadas. En caso de que sea necesaria una regulación posterior, por favor, siga estas indicaciones.”

12. Debajo de la pieza plástica principal encontrará un tornillo prisionero que deberá aflojarse utilizando la llave allen que le fue entregada con la silla. **Fig. 8**

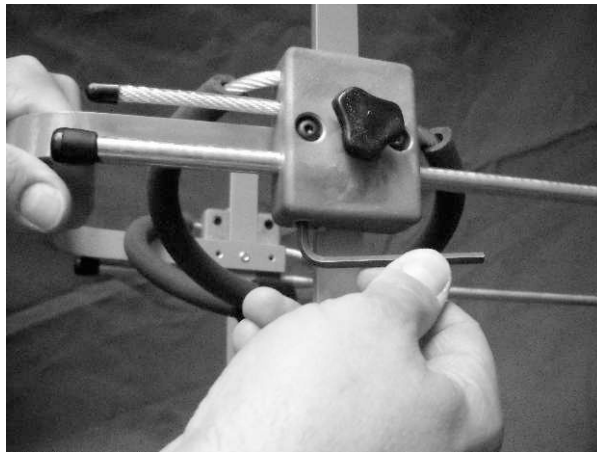


Fig. 8

13. Una vez regulado el largo a la medida deseada, vuelva a ajustar este tornillo.

IMPORTANTE: No ajuste este tornillo en demasía ya que puede barrer la rosca realizada sobre el plástico

REGULACION DE LOS ANILLOS DE GOMA

“Solo en aquellos casos en que las patas de su mascota a la altura de la inglete, queden muy ajustadas o muy flojas, Ud. deberá hacer este ajuste”

14. Afloje el tornillo prisionero que se encuentra en la parte de arriba de la pieza plástica principal. **Fig. 9**

15. Estire o afloje el cable que pasa a través de la *pieza plástica principal* hasta que las patas de su mascota calcen cómodamente.

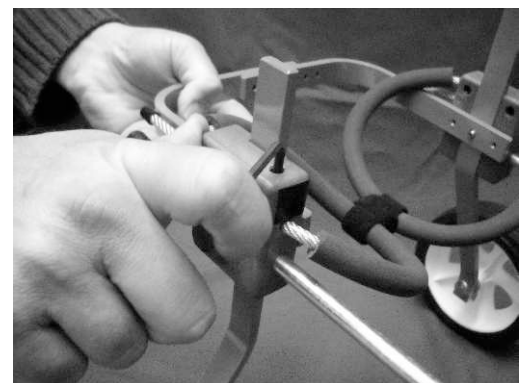


Fig. 9

REGULACION DEL ANCHO

“Seguramente Ud. recibió la silla con esta regulación pre-establecida por nosotros, en base a las medidas que nos fueron enviadas. En caso de que sea necesaria una regulación posterior, por favor, siga estas indicaciones.”

16. Afloje los tornillos pasantes que se encuentran en la parte posterior de la silla utilizando la llave allen proporcionada. **Fig. 10**

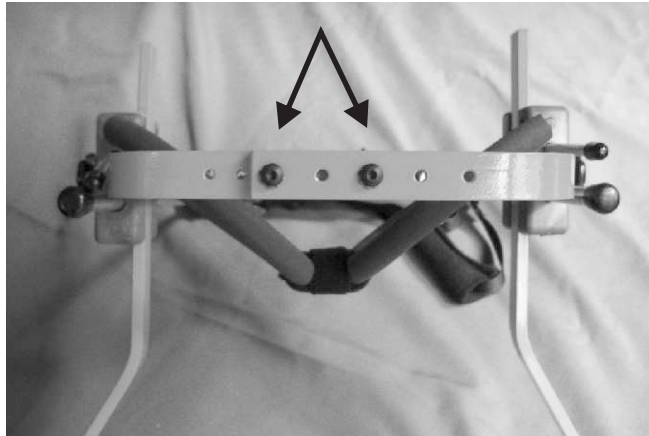


Fig. 10

17. Agrande o achique el ancho de la silla, haciendo coincidir siempre los dos tornillos.

IMPORTANTE:
LA VARILLA QUE CORRE A LO LARGO DE SU MASCOTA
TIENE QUE QUEDAR **PARALELA AL PISO**
Esto se logra ajustando o aflojando la soga
roja que pasa por encima del lomo de su mascota.

Palabras Finales:

*Agradecemos toda comunicación que podamos tener con Uds. ya sea en forma de fotos, videos, historias o cualquier sugerencia que nos ayude a mejorar.
Si algún paso de esta guía le ha sido difícil de comprender, por favor, háganoslo saber.*

El Equipo Petwheels

COLOCACION del REFUERZO

(En caso de que su silla incluya este adicional)

A. Inserte los parantes de las ruedas en las ranuras de las piezas plásticas tal como figura en las siguientes imagenes.




B. Coloque ambos parantes lo más abajo posible. (Hasta el doblez)



C. Ajuste los tornillos internos con la llave allen y luego ajuste la mariposa externa.



La silla con el refuerzo quedará así

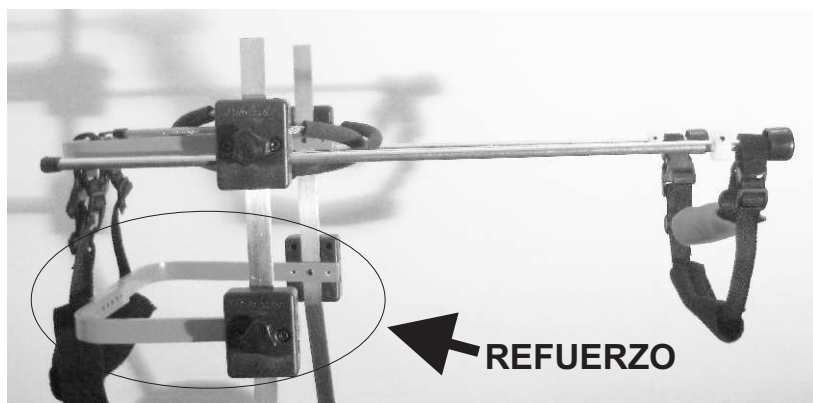

En caso de que la silla quede muy alta con el refuerzo abajo. Pruebe colocando primero la parte con los aros de goma y luego el refuerzo.

Una vez realizado este paso, dirijase a la pag. 2 y continúe con el armado de la silla.